# Reveal imager

### REVEAL GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

### **DEMARRER LE SYSTEM REVEAL**



- 1. Toujours allumer le REVEAL avant de lancer le logiciel REVEAL (interrupteur sous le boitier).
- 2. Double-cliquez sur l'icône REVEAL Canfield Facial Imager pour démarrer le logiciel



### CAPTURE D'IMAGE — NOUVEAU CLIENT

### Préparez le client

1. Enlevez le maquillage, nettoyez et séchez le visage.

### Saisissez les données

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Nouveau client.



2. Saisissez les données du client.

Renseignez au minimum le nom du client, les autres informations pourront être rentrées par <u>la s</u>uite.

3. Spécifiez le type Vue: Vue de gauche, Vue de face, Vue de droite puis cliques sur Suivant





### Photographiez le client

1. La fenêtre de l'aperçu vidéo s'affiche, positionnez la mentonnière en fonction du type de vue

(Par exemple en face pour les images vue de face).

Référez-vous à l'icône en haut à gauche de l'écran pour vous assurer de la bonne position de la mentonnière.

- 2. Indiquez au client de positionner son menton dans le creux de la mentonnière, de maintenir sa tête droite et de regarder bien en face de lui.
- 3. Vérifiez la position du client:
  - Assurez-vous que le client est assis bien droit, avec une expression faciale neutre.
  - Assurez-vous que la tête, le cou et le corps du client soient bien alignés de face ou de troisquarts par rapport au REVEAL en respectant l'angle de la mentonnière en fonction du type de vue.



Quand le client est bien positionné, invitez-le à fermer les yeux et à ne pas bouger. Cliquez alors sur l'icône Capturer.

REVEAL capture les deux images pour ce type de vue et les affiches pour contrôle. Ceci ne prend que quelques secondes. Après l'affichage des images, le client peut ouvrir les yeux et se redresser



**/** 




Cliquez sur Oui pour accepter les images ou bien sur Non pour recommencer la capture des images.

6. Si une autre vue a été sélectionné (paragraphe 3), La fenêtre de l'aperçu vidéo s'affiche à nouveau, suivez les instructions à partir du paragraphe 1.

(Si vous ne désirez pas capturer la vue affiché dans la fenêtre de l'aperçu vidéo, cliquez sur Sauter Vue).

7. Une fois que toutes les images ont été capturées, la fenêtre de consultation s'affiche et vous pouvez commencer à utiliser les outils de consultation.

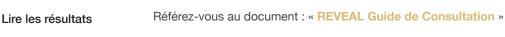



### CAPTURE D'IMAGE - CLIENT EXISTANT - IMAGES DE SUIVI

### Préparez le client

Enlevez le maquillage, nettoyez et séchez le visage.

### Retrouvez le dossier du client

1. Cliquez sur Chercher client.



- 2. Entrez le nom de famille ou d'autres informations.
- 3. Cliquez sur Chercher client.



Cliquez sur le nom puis cliquez sur Suivant.

Cliquez sur Créé une nouvelle session.

- 6. Spécifiez le ou les types de vue.
- 7. Cliquez sur Suivant.



8. La fenêtre de l'aperçu vidéo s'affiche, cette fois l'image de la première capture apparaît en image de fond pour vous aider à repositionner le patient à l'identique.

### Photographiez le client

Reporter-vous à la section CAPTURE D'IMAGE - NOUVEAU CLIENT.



### **OUTILS DE CONSULTATION**

### **VOIR IMAGES**

1.

5.



- Vous pouvez afficher les images une par une.
- Vous pouvez utiliser l'outil Loupe pour les observer en détail.
- Vous pouvez afficher toutes les images dans une seule fenêtre avec la fonction Aperçu



#### VUE 3D

- Vous pouvez utiliser la visualisons 3D pour observer les détails de la surface de la peau.
- Sélectionnez le modèle de couleur à l'aide des icônes :
- Pour faire pivoter la vue 3D : Cliquez et maintenez le clic enfoncé sur la vue 3D tout en faisant glisser la souris.



#### **RESULTATS**



- Vous pouvez comparer les résultats Avant et Après avec cet outil.
- Dans la fenêtre Résultats, vous pouvez sélectionner le type d'image et la date de la session à l'aide des menus déroulants présents sous chaque image.
- Vous pouvez faire un zoom symétrique sur les deux images à l'aide du curseur sous l'image de gauche et faire un fondu entre les deux images à l'aide du curseur sous L'image de droite.



## is a

### **RECOMMANDATIONS**

- Vous pouvez ajouter de recommandations de produits ou de soins pour chaque session.
- La liste des recommandations est entièrement paramétrables selon les produits et soins recommandés dans votre centre.
- Pour paramétrer la liste des recommandations, référez-vous au document : « Paramétrages et personnalisation de la liste des recommandations ».





#### **IMPRIMER RAPPORT**

- Vous pouvez imprimez un rapport que vous remettrez à votre patient.
- Il existe plusieurs modèles de rapport qui vous sont proposés dans la liste des rapports imprimables.

